

**Capillari per ematocrito****BRAND**

Capillari per ematocrito monouso - senza anello di calibrazione - non graduati - per uso con centrifughe per ematocrito - conformi a BS 4316-68 e DIN ISO 12 772 - marcati CE-IVD secondo direttiva 98/78/CE - disponibili eparinizzati: con sodio eparina all'interno di tutta la superficie, codice colore rosso, per sangue capillare oppure non eparinizzati, con codice colore blu, per uso con sangue venoso ed eparinizzato - lunghezza 75 mm $\pm$ 1 mm, spessore circa 0,2 mm, diametro interno 1,1 $\div$ 1,2 mm, diametro esterno 1,5 $\div$ 1,6 mm - durata: circa 3 anni a temperatura ambiente.

Suggerimenti per l'uso:

- Chiusura del capillare riempito:

Tenere il capillare tra il pollice e l'indice appena sotto un'estremità. Premere delicatamente l'estremità non bagnata dal sangue dentro la cera contenuta nella piastra. Per risultati migliori: girare dolcemente e premere contemporaneamente. Il capillare sigillato può essere posto verticalmente su uno dei fori della piastra prima della centrifugazione.

- Centrifugazione:

I capillari vanno posti nella centrifuga con l'estremità sigillata all'esterno; si consiglia di osservare le istruzioni del produttore della centrifuga.

- Lettura del valore dell'ematocrito:

Il composto ceroso contrasta in maniera chiara con la linea delle cellule scure del sangue. Questo facilita la lettura del valore per mezzo del lettore per microematocrito.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

